



## KINOUELL KW-K9 :: Диспенсър за дезинфекция с гел и автоматичен термометър

Фиг.2

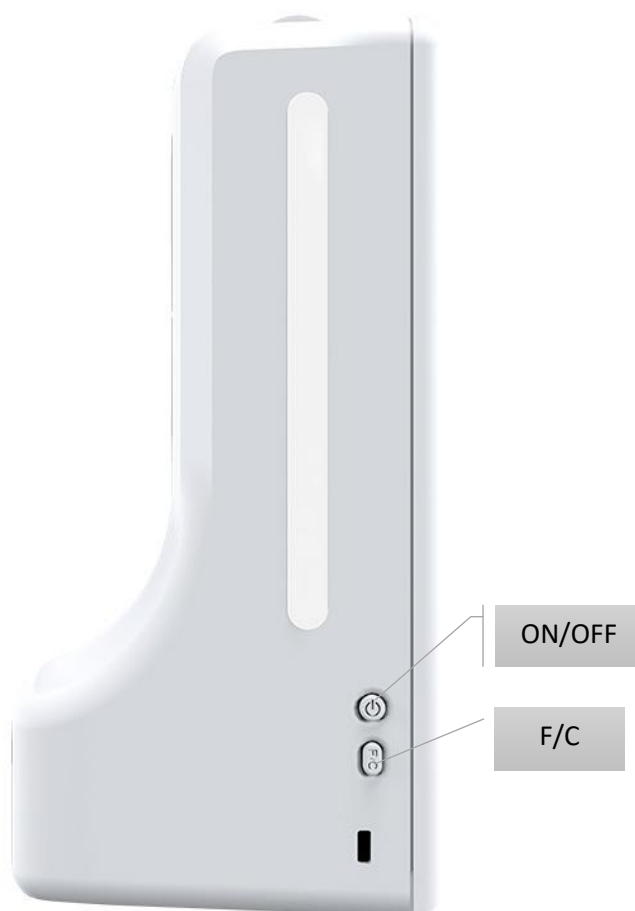

### -Включване на устройството:

1. Включете устройството чрез натискане на бутон  ON/OFF от (фиг.2). На

дисплея ще появи **0.00**. След няколко секунди на дисплея ще се появи премигваща точка от ляво на дясно. Това е знак, че уреда е готов за употреба.

### **-Режим на измерване температура.**

**1.** Уреда има две скали за измерване на температурата по Фаренхайт (°F) и Целзий (°C). Смяната на скалата на измерване става с бутон **F/C** от фиг. 2. След натискане на бутона на дисплея се изобразява символа на съответната скала **F** или **C**.

### **-Режим измерване температура**

#### **1. Режим с аларма (BOD)**

**Нормална температура:** на дисплея се изписва температурата и светва зелена лампа с единичен звуков сигнал.

**Висока температура:** На дисплея се изписва **Hi**(висока) и светва червена лампа придружена с два звукови сигнала.

**Ниска температура:** На дисплея се изписва **Lo**(ниска) и светва червена лампа придружена с два звукови сигнала.

#### **2. Режим без аларма (SUR)**

Измерва само температурата без да алармира за нейните граници.

Смяна на режимите става чрез задържане на бутона **C/F** за няколко секунди. След отпускането му на дисплея се изобразява избраният режим **Bod** или **Sur**.