

Фиг.1

Модел	KW269
Впръскване	Течност/гел
Материал	ABS
Капацитет	1000 мл
Температурна аларма	High 36-42°C / регулируема
	Low 32°C, не се променя
Алармена функция	Светлина + звук 10 сек.
Дистанция на измерване	6-8см.

Описание:

1. Ключ за отваряне на диспенсъра
2. Капачка резервоар за дезинфектант течност/гел
3. Резервоар за дезинфектант течност/гел
4. Място за батерии
5. Бутони + и - за настройка (температура, скала на отчитане, аларма)
6. Температурен панел
7. Преден панел

Монтаж

1. Използвайте ключа **1 (виж фиг.1)** за да отворите предния панел на диспенсъра.
2. Отворете капачката **2** на резервоара **3** и заредете с дезинфектант течност/гел. (капацитет 1000 мл)
3. Отворете капака **4** и поставете 4 бр. батерии **LR14*** размер или свържете със **захранващ адаптер 6V 1A DC***.

(*комплектът не включва батерии или захранващ адаптер)

Включване и настройки.


1. **Включване** - натиснете копчето ON/OFF на позиция **ON**.
2. **Настройки** - на отворен преден корпус настройките се правят чрез бутоните с означения + и -. Настройките са: регулиране дозата на дезинфектанта (малка или голяма), отчитане на температурата по Фаренхайт или Целзий, задаване на температурна аларма и температурна компенсация.

А. Регулиране на дозата дезинфектанта (малка или голяма).

С натискане на копчетата означени с + или - регулира дозата на дезинфектанта във време от 0.1 сек. до 5.0 сек. Избраната настройка се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.


В. Фаренхайт(F) или Целзии(C) скала настройка:

Натиснете бутони + и - едновременно за да влезете в настройката на температурен формат. След това изберете скалата с единично натискане на бутони + или -. Избраната настройка се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.

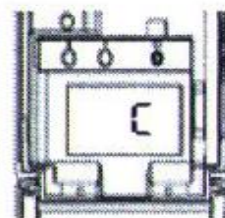


С. Настройка на аларма висока температура:

Натиснете за кратко бутони + и - едновременно за да влезете в настройка на температурен формат Фаренхайт или Целзий. След това отново ги натиснете заедно за да преминете в следващата настройка, температурна аларма. По фабрични настройки температурата е зададена на 38 градуса, а обхвата за настройка е от 35-42 градуса. С натискане на бутони + или - променят температурата за аларма. Избраната настройка се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.

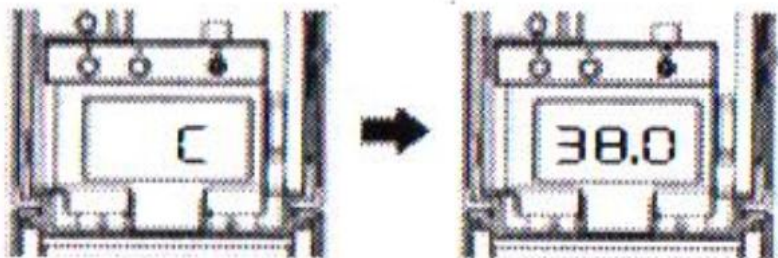

D. Настройка температурна компенсация:

Когато преминете през настройка на аларма за висока температура и натиснете едновременно бутони + и - достигате до настройка за температурна компенсация. По подразбиране компенсацията е 0.00 градуса. Обхватът на настройка е от -1.0 до +1.0 градуса. С натискане на бутони + или - променяте стойността. Избраната настройка се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.

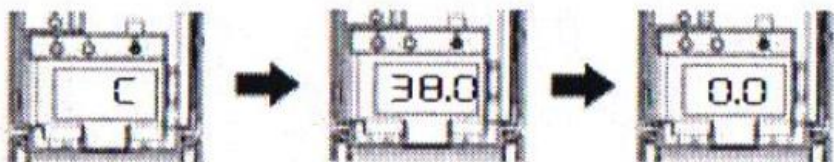

E. Настройка на езика за звуковата сигнализация:

Когато преминете през настройката за температурна компенсация и натиснете едновременно бутони + и - достигате настройка на езика за звуковата сигнализация. С натискане на бутони + или - променяте езика:

0-Китайски език

1-Английски език

2-Корейски език

3-Испански език

4-Португалски език

Избраната настройка се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.



Почистване и профилактика.

За правилното дозиране и работа на диспенсъра е необходимо периодично почистване на дюзата и резервоара за дезинфектант. Налейте в резервоара течен спирт или вода, което ще отстрани запушванията и натрупванията от дезинфектант/гел.